

Patienteninformation Protect

Was sind Künzli Protect Schuhe?

Künzli Protect Schuhe sind Schuhe gegen Umknicken. Die konfektionierten Schuhe haben einen knöchelübergreifenden Schaft. Der Schuh ist auf beiden Seiten mit im Schaft integrierten Stabilisatoren, einem sogenannten Knickstopp, versehen, sowie einem Fersenriemen für optimalen Fersenhalt. Jeder Schuh verfügt über eine multifunktionale, geruchshemmende Einlegesohle mit Überzug aus Cambrelle®. Die Schuhe dienen der Stabilisierung des Sprunggelenks, geben Halt und Sicherheit, bewahren vor Verletzungen und trainieren die Fussmuskulatur in der Bewegung.

Wann werden Protect Schuhe eingesetzt?

Die Künzli Protect Schuhe werden vom Arzt verschrieben, wenn Beschwerden im Fuss oder Sprunggelenkbereich auftreten. So beispielsweise als Prophylaxe bei Instabilität, Prävention und Behandlung von Langzeitschäden, Therapie-Anschluss, Nachversorgung etc. Zur Vorbeugung von Verletzungen im Alltag und Extrem-belastungen bei der Arbeit oder im Sport eignen sich die Protect Schuhe ebenfalls sowie grundsätzlich im Bereich der Therapie wenn ein sicherer und stabiler Stand nötig ist.

Die Schuhe werden über den Orthopädiefachhandel bezogen.

Was sollte beim Tragen von Protect Schuhen beachtet werden?

Künzli Protect Schuhe werden, falls vom Arzt oder Orthopädiefachhändler nicht anders verordnet, immer beidseitig getragen. Je nach Art und Schweregrad der Verletzung oder des Leidens, können sich die Tragdauer und der Anwendungsbereich der Schuhe unterscheiden. Das festgelegte Behandlungsschema sollte keinesfalls selbst geändert werden.

Der Arzt entscheidet und teilt mit, ob und wann die Stabilisationselemente auf der gesunden oder gegebenenfalls auch verletzten Seite entfernt werden dürfen.

Die mit Cambrelle® überzogene Einlegesohle besitzt im Fersenbereich eine Dämmung zur Verhütung von Mini-Erschütterungen beim Auftritt, eine Anti-Knick-Zone in Laufrichtung sowie eine Aktivierungszone für die Sensomotorik im Vorfuss.

Bei Bedarf kann die Einlegesohle durch eine massangefertigte Fussbettung ersetzt werden. Die Schäfte sind direkt auf die darunterliegenden Brandsohlen gezwickt.

Wie werden Künzli Protect Schuhe angezogen?

Die Schnürung der Schuhe vor dem Einsteigen vollständig öffnen und die Zunge soweit wie möglich nach vorne klappen. Vorsichtig in die Schuhe schlüpfen.

Beim Anziehen der Schuhe die Ferse nach hinten schieben, die Zunge zentrieren und den Schuh gut mit dem dafür vorgesehenen Schnürsystem schnüren. In der Zunge befinden sich mittig zwei vertikale Einschnitte als Durchzug für die Nesteln, um ein Verrutschen der Zunge zu verhindern.

Zu lose geschnürte Schuhe führen zu unnötigem Rutschen im Schuh und zu weniger Stabilität. Zu fest geschnürte Schuhe können drücken oder die Durchblutung des Fusses stören.

Schnürsenkel stets sorgfältig verknoten, damit diese später nicht zur Stolperfalle werden. Die Schuhe im Sitzen anziehen und sich beim Aufstehen an der Stuhllehne oder einem anderen stabilen Gegenstand festhalten. Aufgrund verletzungsbedingter Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen kann das Anziehen der Schuhe im Stehen schnell zu gefährlichen Stürzen führen.

Welche Nebenwirkungen können beim Tragen von Künzli Protect Schuhen auftreten?

Beim Tragen der Schuhe kann es manchmal auch zu Druckstellen, Rötungen, Schwellungen oder kleinen Verletzungen kommen. Daher die Füsse täglich kontrollieren. Bei

Auffälligkeiten oder Schmerzen umgehend einen Arzt oder Orthopädiefachhändler kontaktieren. Wenn Nebenwirkungen bemerkt werden, die hier nicht beschrieben sind, sollte ein Arzt oder Orthopädiefachhändler informiert werden.

Wann ist beim Einsatz von Künzli Protect Schuhen Vorsicht geboten?

Gangveränderungen, Gleichgewichtsprobleme, reduzierte Sehschärfe, reduzierte Kontrastwahrnehmung, niedriger Blutdruck und verletzungsbedingte Schmerzen und/oder Bewegungseinschränkungen können das Herbeiführen von Stürzen beim Aufstehen und Gehen fördern. Künzli Protect Schuhe sichern zwar das Sprunggelenk, minimieren aber nicht grundsätzlich das Sturzrisiko.

Besondere Vorsicht ist auch beim Gehen in unebenem Gelände oder auf eisigen Flächen geboten. Zwar verfügen Künzli Protect Schuhe über rutschfeste Sohlen. Diese garantieren aber nicht Rutschfestigkeit in genannten Situationen.

Wie werden Künzli Protect Schuhe gepflegt?

Die drei wichtigsten Schritte der Schuhpflege sind Reinigen, Pflegen und Schützen. Es gilt grundsätzlich: Flecken und Schmutz vor dem Auftragen der Pflege zu entfernen. Schuhe regelmässig pflegen, so bleibt Leder weich und geschmeidig und sieht länger aus wie neu. Die Schuhe langanhaltend vor Nässe und Schmutz schützen.

Reinigen: Leicht verschmutzte Schuhe mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen reinigen. Mit einer alten Zahnbürste den Schmutz aus den Sohlenrändern holen. Starke Verschmutzungen am besten mit einer Bürste unter fließendem Wasser entfernen. Auch die Sohlen von Steinen und Schmutz befreien.

Künzli Protect Schuhe sind nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet. Protect Schuhe werden mehrheitlich aus bestem Qualitätsleder gefertigt, dieses wird schonend behandelt und möglichst umweltgerecht produziert. Leder ist ein Naturprodukt, jede Haut ist deshalb einzigartig. Abweichungen in Farbe, Struktur und Narbenbilder sind keine Herstellungsfehler, sondern ein Beweis für die Echtheit und Hochwertigkeit des Produkts.

Trocknen: Die Schuhe nie direkt in der Sonne, an Heizungen oder anderen Wärmequellen trocknen. Zu schnelles Trocknen macht das Leder spröde und brüchig. Die Schuhe stattdessen mit Zeitungspapier ausstopfen und bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Dies verhindert, dass das Leder hart und brüchig wird. Ein anfängliches Abfärben des Leders lässt sich nicht ausschliessen. Transpiration kann diesen Effekt zusätzlich verstärken. In der Regel kann die Farbe problemlos aus den Socken und Strümpfen ausgewaschen werden.

Imprägnieren: Die Schuhe in regelmässigen Abständen mit einem für Leder geeigneten Imprägnierspray behandeln. Dieser wirkt am besten, wenn die Schuhe noch nicht ganz trocken sind.

Wachsen/Fetten: Damit das Glattleder elastisch und weich bleibt, sollte von Zeit zu Zeit Schuhcreme und/oder Schuhwachs aufgetragen werden. Zum Einreiben am besten ein feines Baumwolltuch verwenden. Ösen oder Haken lassen sich mit Wachs vor Korrosion schützen. Den Schuh anschliessend mit einem feinen Baumwolltuch polieren, bis das Leder wieder glänzt.

Lagern: Auch Schuhe brauchen Ruhe. Schuhe speichern in den meisten Fällen beim Tragen Fussfeuchtigkeit. Damit diese wieder abgegeben werden kann, sollten die Schuhe über Nacht bei Raumtemperatur möglichst lange trocknen können. Gleichzeitig wird dadurch verhindert, dass sich ein störender Geruch in den Schuhen absetzen kann.

Wenn der Schuh eine Zeit lang nicht getragen wird, empfiehlt es sich, die Schuhe im Schuhkarton oder in einem Stoffsack an einem trockenen Ort zu lagern. Um die Schuhe möglichst lange in Form zu halten Schuhspanner verwenden.

Wie und wo erhält man Künzli Protect Schuhe?

Künzli Protect Schuhe erhält man beim Arzt, im Spital oder mit bzw. ohne Rezept im Orthopädiefachhandel.

An wen wendet man sich, wenn Reparaturen nötig sind?

In Garantiefällen, für Reparaturen oder bei anderen Problemen mit Künzli Protect Schuhen beim Orthopädie-fachhändler melden.

Die Garantiezeit wird nach den allgemeinen Richtlinien für die Behandlung von Beschwerden im Schuhhandel von 2002 gehandhabt.

Sämtliche Schuhe werden einer Qualitätskontrolle unterzogen. Bei den Protect Schuhen kommt es sehr selten zu Reklamationen. Je nach Situation werden allfällige Mängel repariert oder der Schuh wird gegebenenfalls ersetzt. Die Firma Künzli geht grundsätzlich sehr kulant mit Beschwerden um.

Hersteller
Künzli SwissSchuh AG
Hauserstrasse 47
5210 Windisch
www.kuenzli-schuhe.ch

erstellt am 02.06.2021